



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
**Scuola secondaria di 1° grado**  
**Castrovillari**



REGIONE CALABRIA



Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS)

Sito web: [www.scuolamediacastrovillari.edu.it](http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it)

E.mail: [csmm303009@istruzione.it](mailto:csmm303009@istruzione.it) - PEC: [csmm303009@pec.istruzione.it](mailto:csmm303009@pec.istruzione.it)

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

Circ.36

Prot.1479

Castrovillari, 2 ottobre 2020

**Alle famiglie degli alunni**  
**Al personale docente e ATA**  
**Agli atti**  
**Al sito web**

**OGGETTO:** distribuzione mascherine chirurgiche. Informativa e istruzioni.

Si comunica a quanti in indirizzo che nella mattinata odierna è stata effettuata la consegna a **ciascun alunno e al personale di una confezione contenente 10 mascherine chirurgiche monouso di tipo II.**

Tenuto conto degli alunni iscritti e di tutto il personale, si è pertanto provveduto a distribuire quasi 7.000 pezzi.

Le mascherine distribuite sono state fatte recapitare alla Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 dottor Domenico Arcuri.

Di seguito si riportano, relativamente ai dispositivi distribuiti in data odierna, le informazioni fornite dal produttore complete di istruzioni per l'uso.



PR9886P2A

**MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO  
DI TIPO II**

**PRODOTTO IN ITALIA DA FAB S.p.A.**

GRUPPO  
**GRAZIOLI**

**Informazioni del produttore**

Mascherina monouso non sterile di tipo II prodotta in ottemperanza alle disposizioni della norma UNI EN ISO 14683 per Maschere Facciali ad Uso Medico.

Realizzate ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18



La sicurezza al tuo fianco

FAB SPA  
VIA DELLE GUARDIE, 1  
25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)  
TEL. +39 030 685 3211  
FAX +39 030 685 3222  
[INFO@FABSPA.IT](mailto:INFO@FABSPA.IT)  
[WWW.FABSPA.IT](http://WWW.FABSPA.IT)  
P. IVA 02850580172

**Istruzioni per l'uso**

1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool
2. Sostituire la mascherina ad ogni uso (monouso)
3. Togliere la mascherina dagli elastici, evitando di toccare la parte frontale
4. Gettare la mascherina in un contenitore chiuso
5. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool

Rev.00\_maggio2020



8 017195 062913 >

Lotto di produzione n. 1444/2020  
Data di scadenza : 31/07/2025

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Gianmarco D'AMBROSIO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93